 ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ РЕКОМЕНДУЕТ  
РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**МИНИ-ПРИНТЕР OMRON  
(модель NHX-PRINT-E1)  
для измерителей  
артериального  
давления OMRON  
с функцией IT**

 Intelli  
sense™

**При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона,  
находящегося в середине настоящего Руководства по эксплуатации.  
Благодарим Вас за покупку!**

**2** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● **Мини-принтер**

**Содержание**

---

Введение .....	3
Описание мини-принтера OMRON .....	3
Установка/замена элементов питания .....	4
Подсоединение мини-принтера OMRON .....	5
Загрузка бумаги .....	5
Как пользоваться мини-принтером OMRON .....	7
Неисправности .....	11
Технические характеристики .....	12
Адреса региональных торговых представительств и центров технического обслуживания OMRON HEALTHCARE в России .....	13
Гарантийный талон .....	между 8 и 9

## Мини-принтер

3


### Введение

Мини-принтер OMRON может быть подсоединен к измерителям артериального давления с гнездом для подключения мини-принтера OMRON.

### Описание мини-принтера OMRON


#### Электронный блок мини-принтера OMRON

1. Крышка мини-принтера
2. Лампа POWER, сигнализирующая о том, что на мини-принтер подано питание, и он находится в рабочем режиме
3. Соединительный кабель со штеккером
4. Кнопка управления подачей бумаги
5. Кнопка GRAPH для распечатки графиков
6. Кнопка ALL DATA ("ВСЕ ДАННЫЕ") для вывода на печать всех данных, хранящихся в памяти прибора
7. Кнопка DATA/STOP для управления процессом печати текущих данных и прерывания процесса печати в случае необходимости

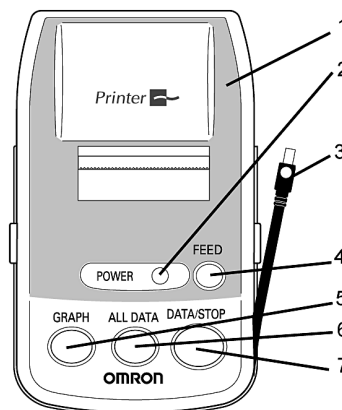


**Установка/замена элементов питания**


1. Сдвиньте крышку отсека элементов питания в направлении стрелки.

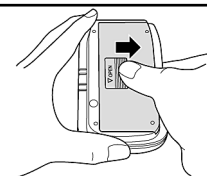

2. Установите или замените 4 элемента питания типа "AA" таким образом, чтобы маркировки "+" и "-", обозначающие полярность батарейки, совпадали с аналогичной маркировкой, нанесенной в отсеке элементов питания.

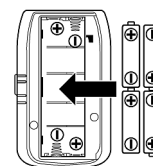

3. Установите на место крышку отсека элементов питания.

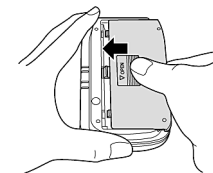

**Внимание:**


Вынимайте элементы питания, если Вы не пользуетесь мини-принтером в течение длительного времени.

## Мини-принтер

5

### Подсоединение мини-принтера OMRON


1. Извлеките соединительный кабель со штеккером из блока мини-принтера.

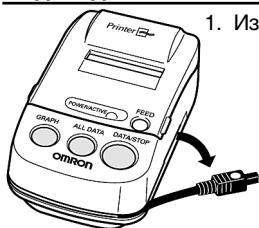

2. Подсоедините штеккер соединительного кабеля к электронному блоку измерителя артериального давления. Окружность, нанесенная на штеккере, должна находиться сверху.

### Загрузка бумаги в мини-принтер OMRON



1. Откройте крышку мини-принтера в направлении, обозначенном стрелкой, и извлеките из мини-принтера рулон бумаги.

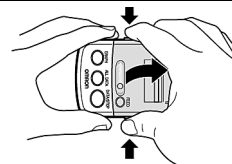

6


## Мини-принтер

2. Снимите с рулона клейкую ленту и отрежьте ножницами первые 10 см бумаги

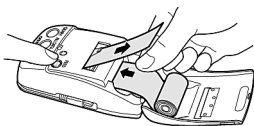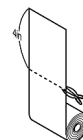

3. Нажмите и удерживайте кнопку FEED ("Подача") и одновременно вставляйте конец рулона в паз подачи бумаги на мини-принтере OMRON. Когда из мини-принтера выйдет конец бумаги достаточной длины, отпустите кнопку FEED.

4. Закройте пластиковую крышку мини-принтера OMRON. Убедитесь, что конец рулона бумаги достаточно выступает из верхней части мини-принтера при закрытой крышке.

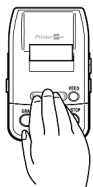

5. Термочувствительная бумага поставляется вместе с мини-принтером. Для работы с мини-принтером OMRON используйте только такую бумагу или бумагу аналогичного размера (шириной около 38 мм и диаметром около 26 мм). Бумагу для мини-принтера OMRON Вы можете приобрести у авторизованных дилеров или в центре технического обслуживания OMRON.

## Мини-принтер

7

### Как пользоваться мини-принтером OMRON

Измерители артериального давления OMRON с гнездом для подключения мини-принтера OMRON способны выдавать распечатку результатов измерений, хранящихся в их памяти.

#### ПРИМЕЧАНИЯ.


Убедитесь, что мини-принтер OMRON подсоединен к измерителю артериального давления (см. раздел "Подсоединение мини-принтера OMRON").

Не пользуйтесь мини-принтером, если в него не загружена бумага (см. раздел "Загрузка бумаги в мини-принтер OMRON"). При работе мини-принтера измеритель артериального давления может быть выключен. Мини-принтер OMRON автоматически выключится, когда процесс печати закончится. Если Вам необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ мини-принтер в процессе печати, нажмите кнопку DATA/STOP.

1. Нажмите кнопку DATA/STOP, чтобы распечатать результаты последнего измерения.


Полученная распечатка будет выглядеть следующим образом:

Месяц/день	7/9	6:36 AM	— Время
Показания систолического давления	SYS	111 mmHg	
Показания диастолического давления	DIA	67 mmHg	
Частота пульса	PULSE	77 /min	

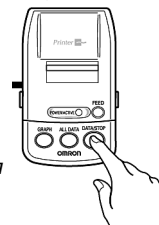

## 2. Нажмите кнопку ALL DATA ("ВСЕ ДАННЫЕ"):

мини-принтер выдаст Вам распечатку всех результатов измерений хранящихся в памяти, а также их средние значения (количество выводимых на печать данных зависит от объема памяти Вашего измерителя артериального давления).

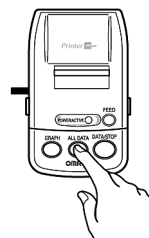

	Колонка значений систолического давления	Колонка значений диастолического давления	Колонка значений частоты пульса	
Месяц(ы)	mmHg SYS	mmHg DIA	/min PUL	
Дата	20 15	113	75	67
	23 11	117	69	64
Время (час)	1 15	113	71	63
	3 14	110	67	66
	5 7	112	66	64
	15 7	110	61	64
	20 12	106	66	65
	3 12	110	65	64
	10 12	108	61	67
	12 14	111	56	62
	14 7	107	64	64
	21 15	111	64	64
	22 12	121	62	66
	4 6	112	64	63
*AV.	112	65	65	

Результат самого  
раннего измерения

Результат  
последнего  
измерения

Среднее значение всех  
храняемых в памяти  
измерителя показаний

Полученная распечатка должна содержать данные всех результатов измерений, хранящихся в памяти измерителя артериального давления. Перечень будет начинаться с данных самого раннего измерения и заканчиваться результатами последнего измерения.



## **Гарантийный талон**

### **Срок гарантии 36 месяцев**

#### **ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты продажи. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ "О защите прав потребителей", регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
  - использования прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
  - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - наличия механических или иных повреждений изделия;
  - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
  - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора;
  - подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные фирмой OMRON.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
  - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, а так же расходных материалов (элементов питания и т.д.);
  - использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
  - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

В соответствии с Законом "О защите прав потребителя" "...изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости **провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.**

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара".

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Заполняется торгующей организацией

Модель	ННХ-PRINT-E1
Заводской номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	<i>Штамп магазина</i>
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил	<i>Подпись покупателя</i>

### Заполняется Центром технического обслуживания OMRON HEALTHCARE в России

Дата приема	
Особые отметки	
Подпись мастера	
Печать центра технического обслуживания OMRON HEALTHCARE	



### Уважаемые покупатели!

Наряду с измерителями артериального давления компания OMRON производит целый спектр медицинских приборов, помогающих сохранять здоровье и вести здоровый образ жизни как Вам, так и Вашей семье. Среди них:

- **ингаляторы OMRON**

для ингаляционного лечения.

Одним из эффективных способов лечения **бронхиальной астмы** и **аллергии** является ингаляторная терапия.

При использовании ингалятора лекарственный препарат попадает непосредственно к органам дыхания, минуя кровь. Неблагоприятные побочные явления лекарства сводятся к минимуму.

Ингаляторная терапия значительно облегчает течение болезни в периоды ее обострений;

- **определитель жировых отложений OMRON** позволяет узнать точное количество и процентное содержание жира в организме;
- **компактные шагомеры OMRON** покажут Вам, сколько было сделано шагов и истрчено калорий при беге или пеших прогулках в течении дня;
- **медицинские массажеры OMRON** применяются для миотерапии при:
  - мышечной боли;
  - мышечной усталости;
  - напряжении в мышцах;
- **электронные термометры OMRON** для измерения температуры безопасны для ребенка, не содержат вредных веществ и не бьются.

**Будьте здоровы вместе с OMRON!**

## Мини-принтер

13

### Месяц(ы)

На листе распечатки будет представлен месяц или месяцы, в которые производились измерения артериального давления.

Например, если в памяти прибора хранятся результаты измерений, проведенных в период с марта по июнь, на листе распечатки в данной колонке будут указано "3-6".

### Дата

В этой колонке будут представлены числа месяца (от 1 до 31), в которые проводились измерения.

Например, если в памяти прибора хранится результат измерения, проведенного 1 июня, на листе распечатки, в колонке, обозначенной буквой "D", будет указано "1".

### Время / Час



В этой колонке будет представлен только час проведения измерения. Например, если в памяти прибора хранится результат измерения, проведенного в 3:00 после полудня, в листе распечатки, в колонке, обозначенной буквой "T", будет указано "15".

### Примечание.

Если время и дата не были установлены перед проведением измерения, на листе распечатки не будут указаны такие данные, как месяц, время/час и дата.

## Мини-принтер

3. Нажмите кнопку GRAPH, чтобы распечатать результаты Ваших измерений в графической форме.

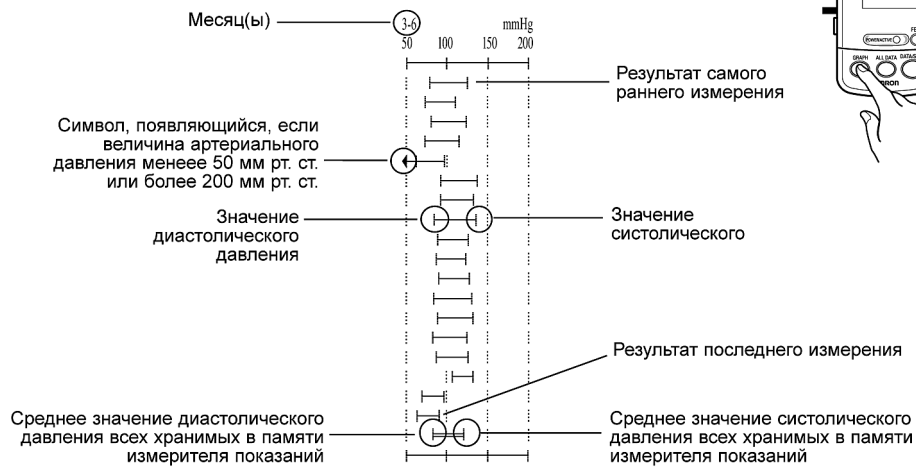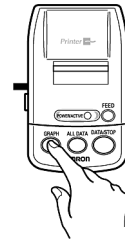

**Мини-принтер****15****Неисправности**

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Лист распечатки пустой	Соединительный кабель мини-принтера недостаточно хорошо подключен к измерителю артериального давления или поврежден	Подсоедините кабель правильно, руководствуясь сведениями, приведенными на стр. 5. Свяжитесь с сервисной службой
	Элементы питания разряжены	Замените элементы питания
	В памяти прибора не хранится никаких данных	Проведите измерение, а затем распечатайте его результаты
	Неправильно загружена бумага в мини-принтер	Загрузите бумагу правильно
Лампа POWER/OPERATION мигает, процесс печати прерывается	Элементы питания разряжены	Замените элементы питания
Бумага не выходит из мини-принтера	В мини-принтер OMRON не загружена бумага / Мини-принтер "зажевал" бумагу / В мини-принтере закончилась бумага	Выньте "зажеванную" бумагу из мини-принтера и загрузите бумагу вновь. Приобретите новый рулон бумаги для мини-принтера OMRON

**Технические характеристики**

Источник питания	4 элемента питания по 1,5 В типа "AA" LR 6
Срок службы элементов питания	примерно 300 включений мини-принтера OMRON
Тип и размер бумажного рулона	термочувствительная бумага, диаметр 26 мм, ширина 38 мм
Расход бумаги	примерно 200 распечаток в одном рулоне
Масса мини-принтера (без батареек)	170 г
Габаритные размеры	123x72x50 мм

**Примечание.**

Технические данные могут быть изменены без предварительного объявления. Для утилизации данного прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в вашем городе или к местным органам власти для получения более подробной информации по утилизации.



Срок службы мини-принтера OMRON 7 лет.

Мини-принтер для тонометров OMRON NHX-PRINT-E1 по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 относится к коду ОКП 40 3300, не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», не включен в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982, и не подлежит сертификации и декларированию.



## Мини-принтер

17

### АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON HEALTHCARE В РОССИИ

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON в России

Юридический адрес: 123557, Москва, Б. Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14

Адрес и телефоны Центра технического обслуживания OMRON: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. "Маяковская")

Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

Телефон бесплатной горячей линии по России 8-800-555-00-80

E-mail: [csinfo@csmedica.ru](mailto:csinfo@csmedica.ru),  
[service@csmedica.ru](mailto:service@csmedica.ru) (сервисный центр)

[www.csmedica.ru](http://www.csmedica.ru)

Часы работы Центра технического обслуживания OMRON:  
пн-пт: с 09.30 до 19.00 (без перерыва на обед),  
сб: с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед),  
вс и праздничные дни - выходной

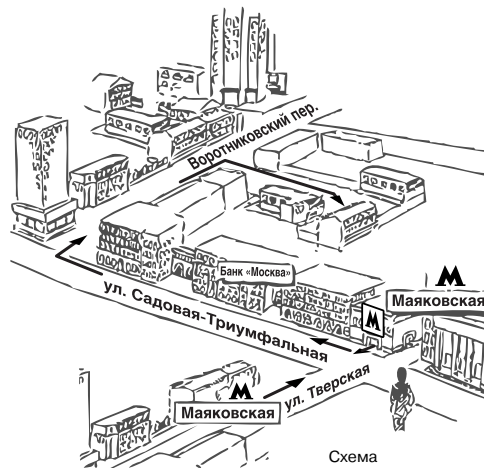


Схема расположения Центра технического обслуживания OMRON

- Арзамас ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: 8 (831) 472-96-05, arz\_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Ефремова, д. 101, тел.: (86137) 58-202, cs\_medica@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЗс Медика Поморье», ул. Северовинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, romote@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЗс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЗс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22 cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Архерейская, д. 2А, оф. 11 тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЗс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 7, оф. 321, тел.: (4162) 42-12-23, csmedica\_amur@tsl.ru
- Братск, ООО «СиЗс Медика Восток» (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЗс Медика Брянск», 2 Советский переулок, д.3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЗс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-v@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЗс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЗс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЗс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru

- Воронеж, ООО «СиЗс Медика Черноземье», ул. Грамши, д. 73а, тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЗс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЗс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЗс Медика Вятка» (Киров), ул. Союзная, д. 49а, оф. 4, тел.: (3412) 36-76-60, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЗс Медика Восток», ул. Карла Либкнехта, д. 121, тел.: (3952) 205-141, 206-687, 298-458, 298-456, 291-268, vostok@csmedicairk.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЗс Медика Йошкар-Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csmf@mail-el.ru
- Казань, ООО «СиЗс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, csmedica16-wnh@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЗс Медика Калининград», ул. Наревская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЗс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, 8 (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЗс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60 nikitin\_cs@mail.ru
- Киров, ООО «СиЗс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЗс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, ООО «СиЗс Медика Кубань», ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (861) 210-01-92, 210-01-35, cs\_medica@kubannet.ru

- Красноярск, ООО «СиЗс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЗс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, 1 этаж, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, ООО «СиЗс Медика Липецк», ул. Угловая, д. 15, владение 7, тел.: (4742) 27-03-78, 28-14-70, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЗс Медика Урал» (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 143/3, тел.: (3519) 29-49-14, mgd@csmedica-ural.ru
- Махачкала, ООО «СиЗс Медика Махачкала», ул. Дзержинского, д. 176, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные воды, ООО «СиЗс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЗс Медика Карелия» (Петрозаводск), просп. Ленина, д. 5, оф. 1, тел.: (8152) 25-53-43, murgmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЗс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЗс Медика Югра», просп. Победы, д. 266, оф. ОМРОН, тел.: 8 (902) 855-85-01, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЗс Медика Новокузнецк», ул. Суворова, д. 6, тел.: (3843) 74-22-30, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Энгельса, д. 78, тел.: (8617) 72-35-40, cs\_medicanov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЗс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru

## Мини-принтер

19

- Омск, ООО «СиЗс Медика Омск», ул. Косарева, д. 103, тел.: (3812) 21-03-00, 25-54-66, 59-55-03, csmedica\_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЗс Медика Орёл», ул. 8 Марта, д. 8, тел.: (4862) 43-67-99, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЗс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЗс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, csprodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЗс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЗс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЗс Медика Карелия», ул. Мерццогого, д. 16, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: 8(911)885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru
- Россошь, ООО «СиЗс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, gossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 300, тел.: (846) 267-38-33, 273-83-63, 273-83-22, csmedica-samara@samta.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, строение 3, оф. 103, тел.: (846) 267-38-40 service63@csmedica.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», проспект Обуховской обороны, д. 120 лит. И, оф. 713, тел.: (812) 309-09-80, (812)-316-55-00 csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскоевский просп., д. 36, тел. (812) 715-88-93, srboservice@csmedica.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, 2 этаж, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (83130) 6-39-59, medica\_sar@mail.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 28, тел.: (8622) 64-74-67, cs\_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol\_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Университетская, д. 25, оф. ОМРОН, тел.: 8 (912) 817-41-41, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Сызрань, ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Московская, д. 4, тел.: (8464) 92-25-49, sismedica@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Чичканова, д. 48, №16, тел.: 8 (4752) 53-51-94, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Офицерская, дом 6а, оф. 4, тел.: (8482)74-88-89, 36-11-36, csmedica-tt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Нахимова, 13/1, оф. 205, тел.: (3822) 902-703, info\_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 2, оф. 2., тел.: 8-908-873-30-47, (3452) 30-46-17, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Восток» (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica\_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СиЗс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЗс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica-ural.ru
- Череповец, ООО «СиЗс Медика Вологда», ул. Краснодонцев, д. 24, оф. 1, тел.: (8202) 20-55-33, csmedicaheropenovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЗс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110 а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru

**Изготовитель:**

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (ОМРОН ХЭЛСКЭА Ко., Лтд.)  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN  
(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото, 617-0002 ЯПОНИЯ)

**Представитель в Европе:**

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)  
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS (Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)  
[www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)

**Производственное подразделение:**

OMRON DALIAN Co., Ltd. (ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко., Лтд.)  
No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China  
(№ 3, Сонг Джанг Роуд, Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне, Далянь 116600, Китай)



Эксклюзивный дистрибьютор и импортер  
медицинской техники OMRON в России

**Юридический адрес:**

123557, Москва, Б.Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу: 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4  
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3  
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

**Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80**

E-mail: [csinfo@csmedica.ru](mailto:csinfo@csmedica.ru), [service@csmedica.ru](mailto:service@csmedica.ru) (сервисный центр)  
[www.csmedica.ru](http://www.csmedica.ru)