


# OMRON

## ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ

### Модель Eco Temp Basic

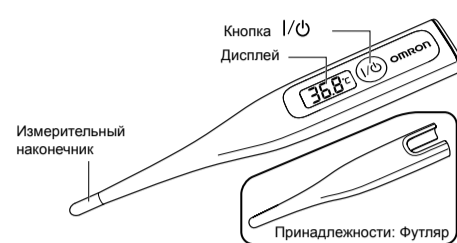

Благодарим Вас за приобретение цифрового термометра OMRON Eco Temp Basic.

Купленный Вами термометр обеспечивает безопасное, точное и быстрое измерение температуры тела. Измерить температуру можно в анальном отверстии (ректальный), во рту (оральный) или подмышкой (аксилярный способ измерения). Используя этот термометр, можно не беспокоиться о том, что стекло разобьется, а также об опасности поражения ртутью. Помните, что курение, прием пищи или жидкости влияют на температуру тела. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно температуры тела, обратитесь к своему врачу.

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы гарантировать правильное использование термометра, необходимо всегда соблюдать основные правила безопасности, включая приведенные ниже меры предосторожности.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- При высокой температуре, а также, если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
  - Внимательно прочтите прилагаемые инструкции и следуйте им, чтобы получать точные показания. Помните, что на показания температуры влияют многие факторы, в том числе физические нагрузки, прием горячих или холодных напитков перед измерением, а также техника измерения.
  - Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в ухе, поскольку полученные показания могут быть неверными, и, кроме того, это может привести к травме.
  - Самостоятельная постановка диагноза на основании полученных результатов опасна и может привести к ухудшению состояния. Чтобы верно интерпретировать полученные результаты, обратитесь к врачу.
  - Данный термометр можно использовать для орального и ректального измерения температуры, а также для измерения в подмышечной впадине. Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в ухе, поскольку полученные показания могут быть неверными, и, кроме того, это может привести к травме.
  - Храните термометр в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям самостоятельно измерять температуру. Дети могут поранить себя, если будут измерять температуру без контроля со стороны взрослых.
  - Не оставляйте батарею, крышку датчика или колпачок датчика в доступных для детей местах. Дети могут проглотить их. Если ребенок проглотил батарею, крышку датчика или колпачок датчика, немедленно обратитесь к врачу.
  - Не пытайтесь измерять температуру каждым термометром, поскольку показания могут быть неточными.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**
- При измерении температуры во рту, не следует сильно сжимать термометр зубами. Это может привести к повреждению термометра и/или травме.
  - Термометр предназначен для личного использования.
  - Не пытайтесь разбирать или ремонтировать термометр. Это может привести к получению неточных показаний.
  - Не бросайте батареи в огонь. Она может взорваться.
  - Соблюдайте полярность при замене батареи (+/-). Несоблюдение полярности может привести к прожогам батареи, теплоотделению или взрыву и повреждению прибора.
  - Если термометр не будет использоваться в течение 3 месяцев или более, извлеките батарею. Несоблюдение полярности может привести к прожогам батареи, теплоотделению или взрыву и повреждению прибора.
  - Не используйте термометр в местах, где образуется сильное статическое электричество или электромагнитное поле. Это может привести к получению неточных показаний и повреждению прибора.
  - Не используйте ректальный способ измерения температуры при ректальных расстройствах. Это может привести к ухудшению состояния.
  - Не наступайте на прибор или жесткий футляр.


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте термометр только для измерения температуры тела человека.
- Не бросайте термометр и футляр и не подхватывайте их ударом или вибрацией.

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ШКАЛАМИ ЦЕЛЬСИЯ/ФАРЕНГЕЙТА

Удерживайте нажатой кнопку I/O в течение 7 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

Во время звукового сигнала система измерения на дисплее изменится.

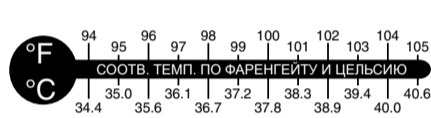


### АКСИЛЯРНЫЙ СПОСОБ (ИЗМЕРЕНИЕ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ)

Следующие факторы могут привести к получению неверных показаний при измерении температуры в подмышечной впадине:

- Сильное потоотделение подмышкой
- Для устранения вышеуказанного фактора: перед измерением температуры насухо вытрите подмышечную впадину.
- Измерение температуры после того, как пациент долго находился под одеялом.

- Поместите измерительный наконечник в центр подмышечной впадины.
- Прижимая наконечник термометра плечом, зафиксируйте его в подмышечной впадине.

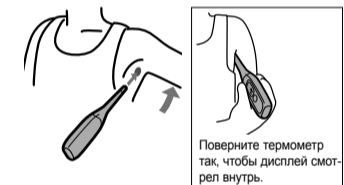

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарея: щелочно-марганцевая батарея таблеточного типа LR41 (доступна в продаже)

### Символ замены батареи (X)

Замените батарею, если после включения термометра появляется символ замены батареи.

- Для снятия крышки используйте монету.
- Извлеките батарею.
- Вставьте новую батарею полюсом «+» вверх, как показано на рисунке.
- С помощью монеты установите крышку батареи на место.

- ПРИМЕЧАНИЯ.**
- Термометр поставляется с батареей для проверки его работоспособности. Срок службы этой батареи, возможно, будет меньше, чем у новой батареи.
  - Не потеряйте уплотнительное кольцо, которое находится поверх резьбы. В противном случае возможно попадание влаги внутрь корпуса, что может привести к неправильным измерениям и неисправности прибора.

### ОТБОБРАЖАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СВМВОЛ	ПРИЧИНА	СПОСОБ РЕШЕНИЯ
L (низкая)	Отображается, если температура чувствительного элемента ниже 32 °C (89,6 °F).	Это не ошибка, температуру можно измерять.
H (высокая)	Отображается, если температура чувствительного элемента выше 42 °C (107,6 °F).	Очистите чувствительный элемент термометра и измерьте температуру.
Отображается температура воздуха	Отображается, если температура окружающего воздуха выше 32 °C (89,6 °F).	
[37,0 °C (98,6 °F)], как индикатор самостестирования, не отображается после результата последнего измерения во время подготовки термометра к измерению.	Несколько раз включите и выключите термометр. Если вместо обозначения самостестирования индикатор в диапазоне от [36,9 °C (98,4 °F)] до [37,1 °C (98,8 °F)], обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру OMRON.	

### ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Компания OMRON рекомендует протирать термометр влажной тканью. Для дезинфекции можно использовать 70% этанол или изопропаноловый спирт. Запрещается дезинфицировать чувствительный элемент термометра погружением его в спирт или горячую воду (температура которой выше 50 °C). Не погружайте термометр на глубину более 15 см и на время более 30 минут.

### ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Нажмите кнопку I/O.
- Присутствие к измерению температуры одним из способов, разрешенных в данной инструкции.
- Подача четырехкратного звукового сигнала [бип-бип-бип-бип] три раза свидетельствует о том, что обязательное минимальное время измерения завершено. Вы можете достать термометр и посмотреть результат.



- Оральное измерение: прибл. 60 секунд**
- Ректальное измерение: прибл. 2 минуты**
- Измерение в подмышечной впадине: прибл. 2 минуты**

- 2 минуты – это минимальное время измерения в подмышечной впадине, позволяющее оценить общее состояние организма. Для получения окончательного результата рекомендуется проводить измерение в течение 5-10 минут (в зависимости от условий окружающей среды и состояния организма).
- Измерение продолжается даже после подачи звукового сигнала.
- Значения интервала подачи звукового сигнала были получены при температуре окружающего воздуха 23 градуса.
- Поскольку оральные и аксилярные способы измерения дают менее точные результаты, для получения наиболее точного результата рекомендуется ректальный способ.
- При измерении температуры в подмышечной впадине неплотный контакт наконечника термометра с кожей, а также индивидуальные физиологические особенности организма могут привести к преждевременному срабатыванию звукового сигнала и завышенному результату измерения. Поэтому в случае аксилярного измерения для получения точного результата может потребоваться более продолжительное время, в некоторых случаях до 10 минут.

- Выключите термометр. Прежде чем уложить термометр обратно в защитный футляр, протрите и продезинфицируйте его.

### ОТБОБРАЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОЛУЧЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Нажмите кнопку I/O, чтобы отобразить значение температуры, полученное при последнем измерении. Для получения дополнительной информации см. раздел «ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

### СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Только правильный метод измерения температуры обеспечивает его точность. Следующие факторы могут привести к получению неверных показаний.

- Измерение температуры сразу после выполнения физических упражнений, приема ванны, приема пищи или жидкости приведет к неверным показаниям.
- Для получения верных показаний: подождите не меньше 30 минут перед измерением температуры.
- Измерение температуры после выполнения активных действий.
- Для получения правильных показаний: измерьте температуру сразу же после пробуждения или подождите не меньше 30 минут после выполнения активных действий.
- Совершение активных действий после пробуждения приводит к увеличению температуры тела.

### ОРВАЛЬНЫЙ СПОСОБ (ОРАЛЬНЫЙ СПОСОБ (от 4 лет и старше))

Перед началом измерения не открывайте рот в течение 5 минут.

- Поместите термометр в рот, под язык, так, чтобы он касался основания языка слева или справа.
- Чтобы удержать термометр на месте, прижмите его языком.
- Придерживайте термометр так, чтобы он не смешался с ртом.



### РЕКТАЛЬНЫЙ СПОСОБ:

- Используется, как правило, у маленьких детей, когда трудно измерить температуру подмышкой или во рту.
- Сидяще наконечник термометра детским концом или другим не раздражающим кончиком.
- Осторожно вставьте измерительный наконечник в анальное отверстие не глубже чем на 1,3 см. При возникновении сопротивления не прилагайте усилий для ввода наконечника в анальное отверстие.
- Продезинфицируйте термометр после использования.

### Хранение

#### Храните термометр в футляре.

- Запрещается хранить термометр в следующих местах (в противном случае термометр может выйти из строя):
  - в сырых местах;
  - в местах с высокой влажностью и температурой, а также не защищенных от прямых солнечных лучей, vicino нагревательных устройств, в среде с повышенной запыленностью или с высокой концентрацией соли в воздухе;
  - в местах, где термометр будет подвергаться тряске, вибрации или ударам;
  - в местах хранения лекарственных препаратов или с наличием агрессивных газов.

#### ГАРАНТИЯ

Компания OMRON дает на это издание 3 года гарантии с момента покупки. Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного обращения или использования. Гарантия также не распространяется на батарею и упаковку. Иски о возмещении других убытков не принимаются. К гарантийной рекламации должен быть приложен чек на покупку.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование:	Термометр электронный медицинский	Источник питания:	1,5 В пост. тока, 1 щелочно-марганцевый элемент тип LR41
Модель:	OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)	Срок службы элемента питания:	Прибл. 2 года или более (при измерении 3 раза в день)
Потребляемая мощность:	0,1 Вт	Метод измерения:	Фактическое измерение (не прогнозирование)
Тип датчика:	термистор		
Индикатор температуры:	3-риктирный (°C) или 4-риктирный (°F), отображение температуры с дисплеем 0,1 градуса		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры:	± 0,1 °C (32,0-42,0 °C) ± 0,2 °F (от 89,6-107,6 °F) (показание при стандартной комнатной температуре 23 °C [73,4 °F] в тестовой камере, где поддерживается постоянная температура)	Рабочая часть аппарата:	Тип B
Диапазон измерений температуры:	от 32,0 до 42,0 °C (от 89,6 до 107,6 °F)		
Условия эксплуатации:	температура окружающего воздуха от +10 до +40 °C относительная влажность от 30% до 85%		
Условия хранения:	температура окружающего воздуха от -20 до +60°C относительная влажность от 10% до 85%		
Масса:	Прибл. 12 г (с установленной батареей)		
Габаритные размеры:	19,4 мм (ш) x 132,5 мм (ш) x 10,0 мм (в)		
Комплект поставки:	термометр, элемент питания, футляр для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.		

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Прибор водонепроницаемого типа.
- Наконечник термометра содержит инше.
- Этот термометр не содержит каких-либо компонентов, подлежащих техническому обслуживанию. Компания OMRON рекомендует проверять точность измерения температуры раз в два года в представительство OMRON.
- Измерение температуры производится с применением системы строгого контроля качества компании OMRON Healthcare Co., Ltd., Япония.
- Этот прибор удовлетворяет положениям директивы ЕС 93/42/ЕЕС (директива в отношении медицинского оборудования) и европейскому стандарту EN12470:2000, Медицинские термометры — Часть 3. Функционирование компактных электротермометров (не прогнозирующих и прогнозирующих) до максимальной шкалы.
- Издания медицинской техники, термометры электронные медицинские OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU) испытаны и зарегистрированы в России:
  - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОТРАЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
  - Регистрационное удостоверение: ФЭС № 2009/05423 от 23.10.2009. Срок действия не ограничен.
  - СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ
  - Декларация о Соответствии РОСС ЛМЕ20.000464 от 10.03.2011. Срок действия до 10.03.2014. Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267-0-92, ГОСТ Р 50267-0-2-2005

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)  
Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) телефоны, увеличивается, используемые медицинские приборы могут быть чувствительными к электромагнитным помехам, создаваемым другими устройствами. Электромагнитные помехи могут нарушить работу медицинского прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройств.

Чтобы реламинировать требования по ЭМС (электромагнитной совместимости) с целью предотвращения возникновения небезопасных ситуаций, связанных с использованием продукции, был введен в действие стандарт EN60601-1-2:2007. Этот стандарт определяет уровни устойчивости к электромагнитным помехам, а также максимальные уровни электромагнитного излучения применительно к медицинскому оборудованию.

Данный медицинский прибор, произведенный компанией OMRON Healthcare, удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2007 относительно устойчивости к помехам и испускаемому излучению. Тем не менее следует соблюдать специальные меры предосторожности:

- Вблизи данного медицинского прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и прочие устройства, которые генерируют сильные электрические или электромагнитные поля. Это может нарушить работу прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 7 м. Убедитесь в правильности работы прибора, если дистанция меньше.


Остальная документация по соответствию EN60601-1-2:2007 находится в офисе компании OMRON Healthcare Europe по адресу, указанному в этом руководстве. С этой документацией также можно ознакомиться на сайте [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com).

Неадекватная утилизация продукта (использованное электрическое и электронное оборудование)  
Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другим домашним отходом по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, покажите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для широкого повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с рогичными торговыми представителями, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Профессиональным потребителям надлежит связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Данный продукт не содержит никаких вредных веществ. Утилизация обработанных батареек должна производиться в соответствии с установленными правилами утилизации аккумуляторных батарей.

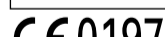

Внимательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.

Производитель	OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (OMRON ХЭЙСКА КО., ПТД) 24, Yamahouchi Yamahouchi-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, JAPAN (24, Ямаучи Ямаучи-чо, Укю-ку, Киото, 615-0084, ЯПОНИИ)	Эксклюзивный дистрибутор в России и импортер	ЗАО «КомплетСервис» 123557, РОССИЯ, Москва, Б. Тихоносин пер., д. 28, корп. 13-14 <a href="http://www.completservice.ru">www.completservice.ru</a>
Представитель в ЕС	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (OMRON ХЭЙСКА ЕВРОПА Б.В.) Klubweg 577, 2132 NA Noorddorp, THE NETHERLANDS (Клубвег 577, 2132 НА Нурддорп, НИДЕРЛАНДЫ) <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>	Производственное подразделение	OMRON (DALIAN) CO., LTD. (OMRON (ДАЛЯН) КО., ПТД) Economic & Technical Development Zone Dalian 116600, CHINA (Экономическая и Техническая Зона Далинь 116600, КИТАЙ)

Сделано в Китае